

介護  
保険 貸与

# LOHATES

据置式手すり ロハテス



経済産業省  
製造産業局長賞



あんしんと、  
その先にあるここちよさ。

# LOHATES (ロハテス) の特長


- 本体重量は約1.8kg と軽量。使いたいところまで簡単に持ち運べます。
- グリップ部は肌触りの優しい天然木を使用しています。



LOHATES(ロハテス)  
ホワイト **貸与**  
019-1550 LH-03WT-R  
1台 **19,500円**(税抜き)  
TAIS 01265-000269



LOHATES(ロハテス)  
ブラック **貸与**  
019-1551 LH-03BK-R  
1台 **19,500円**(税抜き)  
TAIS 01265-000270

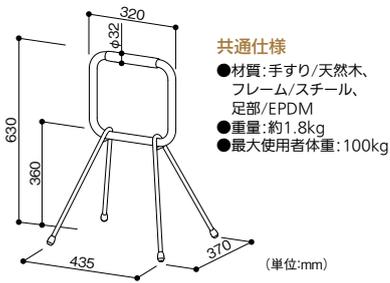

## OPTIONS (オプション)



### LOHATES用トレイ

商品コード	品番	色	価格
019-1504	LH-01T-BN	ブラウン	1個 <b>4,000円</b>
019-1505	LH-01T-GY	グレー	(税抜き)

●材質: ナイロン ●耐荷重: 3kg



### LOHATES用マガジンラック

商品コード	品番	色	価格
019-1506	LH-01M-BN	ブラウン	1個 <b>4,000円</b>
019-1507	LH-01M-GY	グレー	(税抜き)

●材質: 綿 ●耐荷重: 3kg



お問合せ


# HOW TO USE (使い方)

## 椅子からの立ち上がり

1 手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置いてください。



胴体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

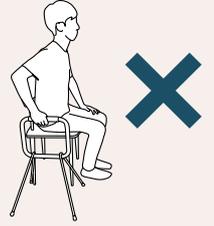


2



足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がります。

## 床からの立ち上がり

1

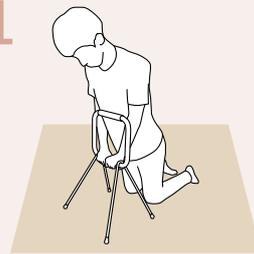

正面にLOHATESを置いて、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整えてください。

2



2段目をつかみ、前傾姿勢の状態、LOHATESを下に押しながら立ち上がります。

### ⚠️ ご注意

- ご使用の際は、水平方向に力をかけないでください。軽量のため、誤った使い方するとLOHATES自体が倒れてしまい、軽傷または物的損害の可能性があります。



**マツ六株式会社**

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号  
<https://www.mazroc.co.jp/>

22.11 (M) 000