


取扱説明書

- この度は「たよレールhigh I/R型用メンテナンス部品」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh I/R型用メンテナンス部品 ベーススポンジセット BZH-HM18


 **警告** 死亡または重症を負う可能性がある内容

 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

マークの種類について

 禁止行為  必ず行う

対応たよレールhigh

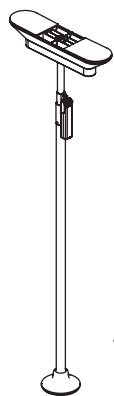

たよレールhigh I型
BZH-10/12




たよレールhigh R型
BZH-11


対応可能な床材

フローリング・クッションフロア

部品明細

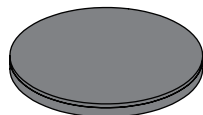


センタースポンジ: 1枚
(吸着スポンジ)

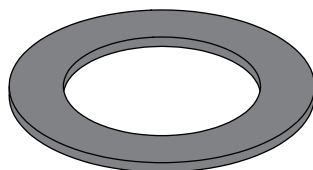

ベーススポンジ: 1枚

取付方法

1. 劣化したスポンジをはがす。

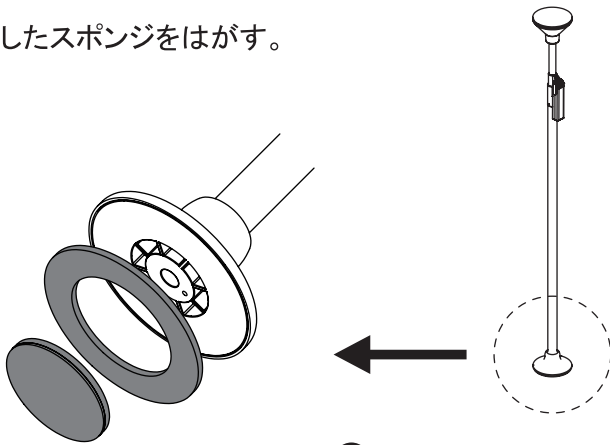


❗ 両面テープの跡がベースプレートに残らないようにスポンジをはがす。

2. 布で貼付け面のほこりやゴミをよく拭きとる。


汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きする。最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

3. スポンジの貼付け。

ベーススポンジを貼付けてからセンタースポンジを貼付ける。

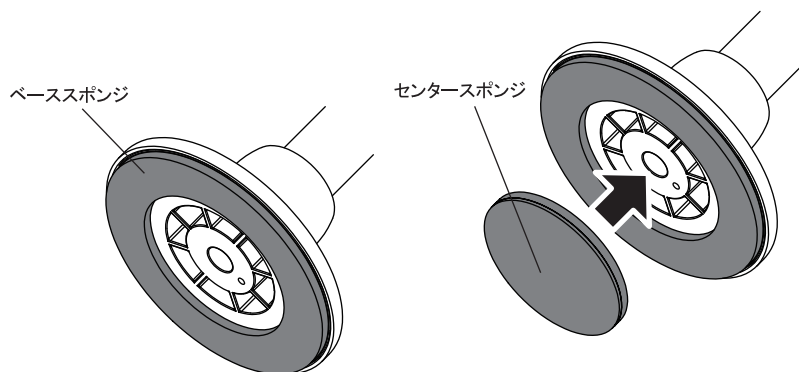

4. センタースポンジ(吸着スポンジ)のフィルムをはがし、手すり・ベースユニットを設置場所に立てる。

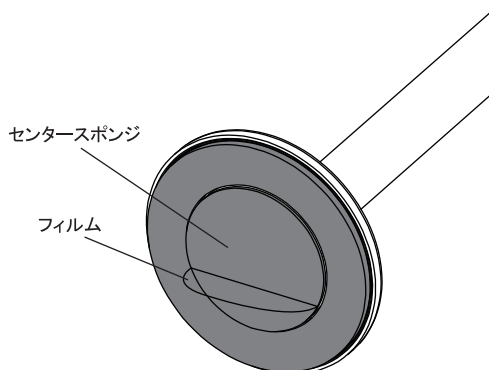

- ⊘ フローリング、クッションフロアが劣化(表面のはがれ・裂け等)している場合は設置しない。
- ⊘ フローリング、クッションフロア以外への設置はしない。

- ❗ センタースポンジのフィルムは必ずはがす。
- ❗ 床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
- ❗ 床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。
- ❗ 設置時にセンタースポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。