

取扱説明書

- この度は「たよレールhigh 用メンテナンス部品」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh メンテナンス部品 フローリングセット BZH-HM2


マークの種類について

⊘ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

⚠ 警告 死亡または重症を負う可能性がある内容


⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

部品明細

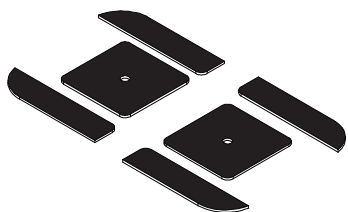


サイドスポンジ右: 2枚
サイドスポンジ左: 2枚
センタースポンジ: 2枚

対応可能な床材と対応たよレールhigh

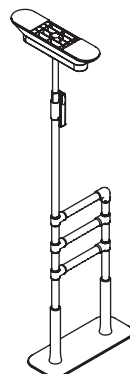

BZH-02での場合
フローリング

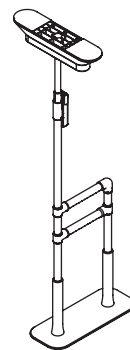


BZH-03での場合
フローリング・クッションフロア

※BZH-03は対応天井高さを制限している為、フローリング・クッションフロアでの使用が可能

取付方法

1. 劣化したスポンジをはがす。

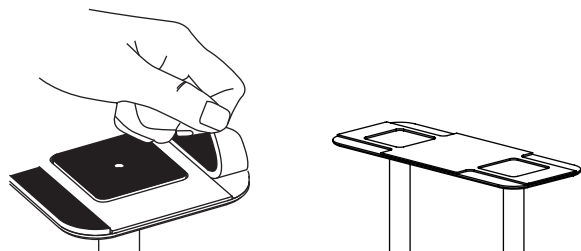


⚠ 両面テープの跡がベースプレートへ残らないようにスポンジをはがす。

2. 布で貼付け面のほこりやゴミをよく拭きとる。


汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きする。最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

3. スポンジの貼付け。

ベースプレート先端より2mm程度の間隔をあけるときれいに貼まる。

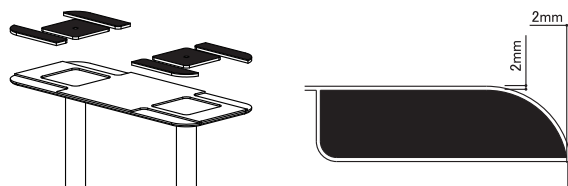

4. 四隅のサイドスポンジ(吸着スポンジ)のフィルムをはがし、設置場所にベースプレートを置く。

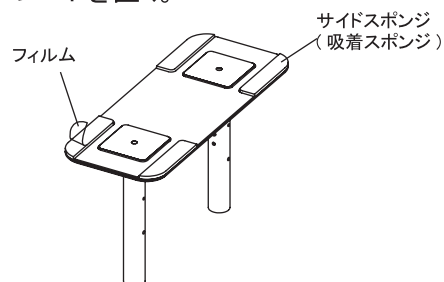

⊘ フローリング・クッションフロアが劣化(表面はがれ・裂け等)している場合は設置しない。
⊘ 上記対応可能な床材以外への設置はしない。

⚠ サイドスポンジのフィルムは必ずはがす。
⚠ 床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
⚠ 床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
http://www.mazroc.co.jp/

2015年10月1日改定