

# 取扱説明書

- この度は「たよレールhigh 用メンテナンス部品」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

## たよレールhigh メンテナンス部品 カーペットセット BZH-HM3


### マークの種類について

⊘ 禁止行為    ⚠ 必ず行う

**⚠ 警告** 死亡または重症を負う可能性がある内容

⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

### 部品明細

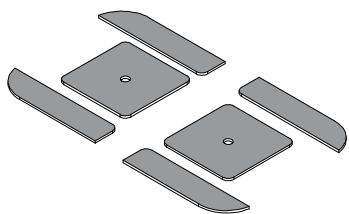


サイドスポンジ右: 2枚  
サイドスポンジ左: 2枚  
センタースポンジ: 2枚

### 対応可能な床材

カーペット

### 対応たよレールhigh

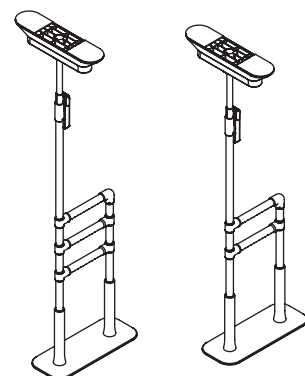


BZH-02

BZH-03

### 取付方法

#### 1. 劣化したスポンジをはがす。

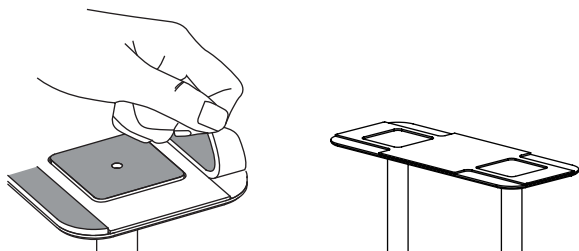



⚠ 両面テープの跡がベースプレートへ残らないようにスポンジをはがす。

#### 2. 布で貼付け面のほこりやゴミをよく拭きとる。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きする。最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

#### 3. スポンジの貼付け。

ベースプレート先端より2mm程度の間隔をあけるときれいにおさまる。

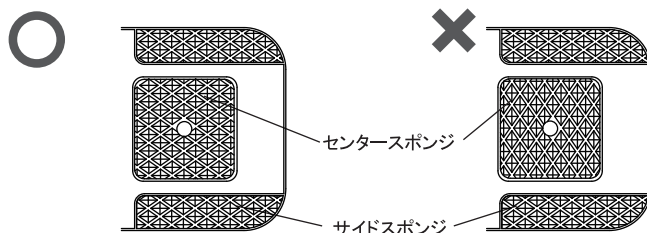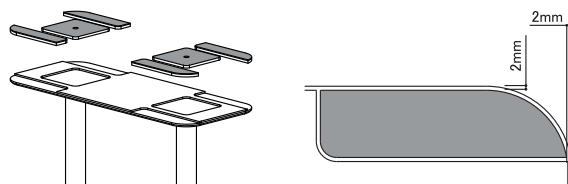

⚠ センタースポンジのスパイクには目方向がある為、必ず上図の向きに合わせて貼付ける。方向が間違っていると十分な強度を発揮できない恐れがある。

#### 4. 設置場所にベースプレートを置く。

- ⊘ カーペットが劣化(表面生地の変色等)している場合は設置しない。
- ⊘ カーペット以外への設置はしない。
- ⊘ 毛足のないカーペット・固定されていないカーペットまたは、毛足が3mm以上のカーペットには設置しない。
- ⊘ 材質がウールのカーペットには設置しない。(カーペットが変色する恐れがある。)

⚠ 床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。  
床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。

**マツ六株式会社**

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号  
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248  
http://www.mazroc.co.jp/

2015年10月1日改定