

取扱説明書

- この度は「たよレールhigh 用メンテナンス部品」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh メンテナンス部品 屋外セット BZH-HM8

マークの種類について

⊘ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

⚠ 警告 死亡または重症を負う可能性がある内容

⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

対応可能な床材


モルタル
コンクリート
塩ビシート
タイル

対応たよレールhigh



BZH-101


部品明細

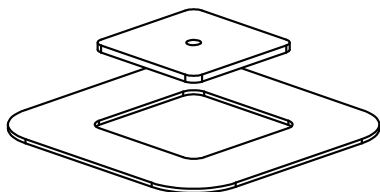

センタースポンジ : 1枚
ベーススポンジ : 1枚

取付方法

1. 劣化したスポンジをはがす。

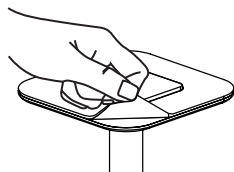


⚠ 両面テープの跡がベースプレートへ残らないようにスポンジをはがす。

2. 布で貼付け面のほこりやゴミをよく拭きとる。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとり、洗剤が残らないように水拭きする。最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

3. スポンジの貼付け。

ベースプレートからベーススポンジがはみでないように貼付けてください。

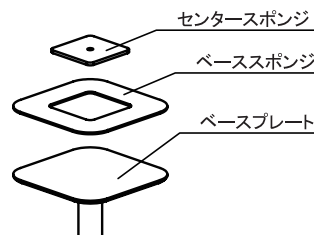

4. 設置場所にベースプレートを置く。

- ⊘ 床材が劣化(割れ・はがれ等)している場合は設置しない。
- ⊘ 上記対応可能な床材以外への設置はしない。
- ⊘ 雨が直接かかり水たまりができる場所には設置しない。

- ⚠ 水勾配がある場合は1/50(1.15°)以下であることを確認する。
- ⚠ 床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
- ⚠ 床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<http://www.mazroc.co.jp/>

2015年10月1日改定