

取扱説明書

- この度は「たよレールhigh 畳・クッションフロア・Pタイル用シート」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh 畳・クッションフロア・Pタイル用シート

BZHO-01


マークの種類について

⊘ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

⚠ 警告 死亡または重症を負う可能性がある内容


⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

対応可能な床材と対応たよレールhigh

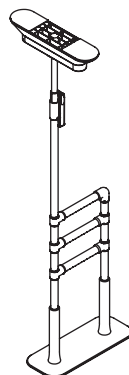

BZH-02-F

BZH-02-Fの場合
畳・クッションフロア・Pタイル

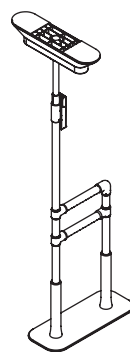


BZH-03-F


BZH-03-Fの場合
畳・Pタイル

※BZH-03-Fは対応天井高さを制限している為、フローリング・クッションフロアでの使用が可能


部品明細

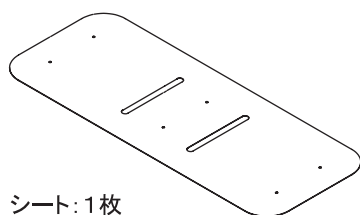

シート: 1枚

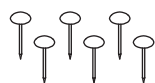

押しピン: 6本

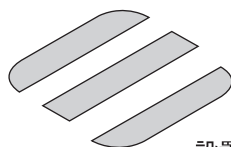

設置用テープ: 3枚

安全上・使用上のご注意


- ⊘ 上記対応可能な床材以外への設置はしない。
- ⊘ 火気を近づけたり、ヒーター等(暖房機)の前で使用しない。
- ⊘ 本来の使用目的以外では絶対に使用しない。
- ⊘ 分解、改造、加工は絶対にしない。

- ⚠ 設置、取りはずしは必ず納入業者様が行う。
- ⚠ シートが著しく変形・損傷した場合は交換する。
(クッションフロア・Pタイルの材質によっては変色・変形する恐れがある)
- ⚠ 床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
- ⚠ 床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。
- ⚠ 押しピンの先端は尖っている為、取扱に注意する。

設置方法

畳への設置


1. 手すりユニットをベースプレートに差し込み、設置場所の天井や床の障害物にベースプレート、天井用ベースプレートが干渉していないことを確認する。
2. 設置場所にシートを置き、付属の押しピンで固定する。(6箇所)

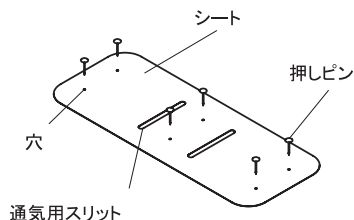

- ❌ 畳が劣化(い草の破れ・ちぎれ等)している場合は設置しない。
- ❌ 畳以外への設置はしない。
- ❌ 畳厚40mm以下の畳または、畳縁には設置しない。
(押しピンが利かない恐れがある。)
- ❌ 床暖房対応の畳には設置しない。
(押しピンにより床暖房が損傷する恐れがある。)

- ❗ 押しピンは必ず6本使用する。


3. 四隅の吸着スポンジのフィルムをはがし、シートがはみ出さないようにベースプレートを置く。

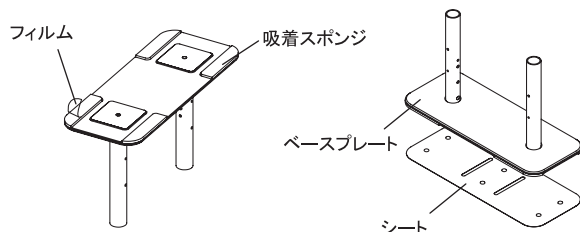

- ❗ 吸着スポンジのフィルムは必ずはがす。
- ❗ 設置時に吸着スポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。
- ❗ シートがはみ出さないように設置する。

クッションフロア・Pタイルへの設置


1. 手すりユニットをベースプレートに差し込み、設置場所の天井や床の障害物にベースプレート、天井用ベースプレートが干渉していないことを確認する。
2. 付属の設置用テープをシートの中央と両端(3箇所)に貼付けた後に設置用テープの剥離紙をはがしテープ面を下にしてシートを設置場所へ固定する。

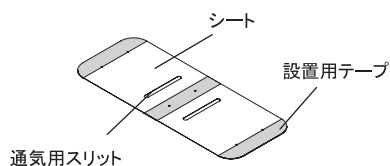

- ❌ クッションフロア、Pタイルが劣化(割れ・はがれ等)している場合は設置しない。
- ❌ タイル、Pタイル以外への設置はしない。
- ❌ 設置用テープは繰り返し使用しない。

- ❗ 設置用テープは必ず3枚使用する。

3. 四隅の吸着スポンジのフィルムをはがし、シートがはみ出さないようにベースプレートを置く。

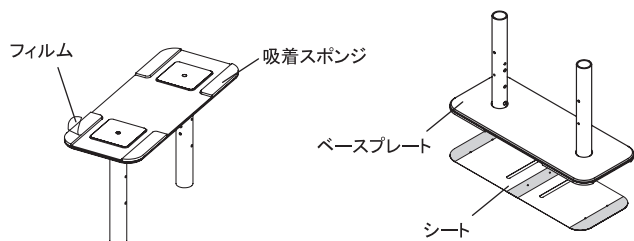

- ❗ 吸着スポンジのフィルムは必ずはがす。
- ❗ 設置時に吸着スポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。
- ❗ シートがはみ出さないように設置する。