

取扱説明書

- この度は「たよレールhigh I/R型用オプション」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh I/R型用オプション スパイクゴム BZHO-04


警告 死亡または重症を負う可能性がある内容

- ⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

マークの種類について

- ⊘ 禁止行為 **!** 必ず行う

対応たよレールhigh

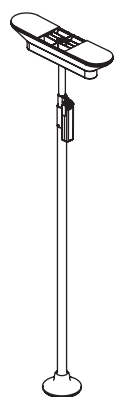

たよレールhigh I型
BZH-10/12




たよレールhigh R型
BZH-11


設置方法

BZHO-04 カーペットへの設置

センタースポンジ(吸着スポンジ)のフィルムをはがし、スパイクゴムをセンタースポンジ(吸着スポンジ)へ貼付け、手すり・ベースユニットを設置場所に立てる。

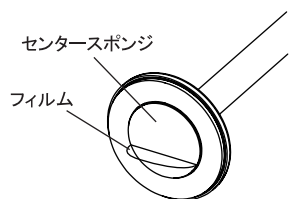

スパイクゴムにはスパイク面と貼付け面があるので、必ず貼付け面とセンタースポンジを貼付ける。

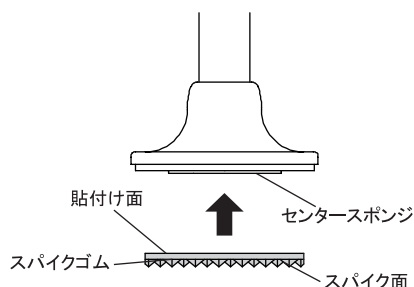

- ⊘
- ・カーペットが劣化(表面生地の変色等)している場合は設置しない。
 - ・カーペット以外への設置はしない。
 - ・パンチカーペット・固定されていないカーペットまたは、毛足が3mm以上のカーペットには設置しない。
 - ・材質がウールのカーペットには設置しない。(カーペットが変色する恐れがある。)



- !**
- ・センタースポンジのフィルムは必ずはがす。
 - ・床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
 - ・床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。
 - ・設置時にセンタースポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。
 - ・スパイクゴムの貼付け面を必ず確認する。
 - ・設置後手すりをゆらしベースプレートに滑りが発生した場合は、ベーススポンジ・センタースポンジまたはスパイクゴムを交換する。

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<http://www.mazroc.co.jp/>

T-141001【01】