


取扱説明書

- この度は「たよレールhigh I/R型用オプション」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は畳セット・タイルPタイルセット・シートメンテナンス部品兼用の取扱説明書となっております。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh I/R型用オプション 畳セット BZHO-05
タイル・Pタイルセット BZHO-06
I/R型用メンテナンス部品 シート BZH-HM23


 **警告** 死亡または重症を負う可能性がある内容

マークの種類について

 絶対に指定製品以外や、他社製品と組み合わせて使用しない。

 禁止行為  必ず行う

対応たよレールhigh

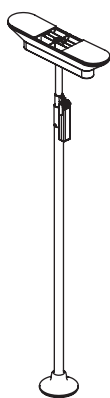


たよレールhigh I型
BZH-10/12




たよレールhigh R型
BZH-11

部品明細

BZHO-05

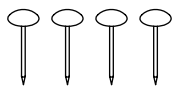


押しピン: 4本

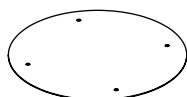


シート: 1枚

BZHO-06

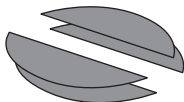

設置用テープ: 2セット
(2枚/1セット 計4枚)

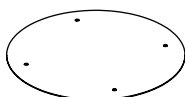

シート: 1枚

BZH-HM23




シート: 1枚

設置方法

BZHO-05 畳への設置

1. 設置場所の天井や床の障害物にベースプレート、天井用ベースプレートが干渉していないことを確認する。


2. 設置場所にシートを置き、付属の押しピンで固定する。(4箇所)

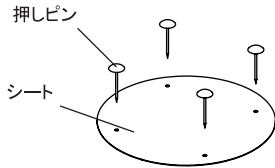

- ・畳が劣化(い草の破れ・ちぎれ等)している場合は設置しない。
- ・畳以外への設置はしない。
- ・畳厚40mm以下の畳または、畳縁には設置しない。(押しピンが利かない恐れがある。)
- ・床暖房対応の畳には設置しない。(押しピンにより床暖房が損傷する恐れがある。)

❗ 押しピンは必ず4本使用する。

3. センタースポンジ(吸着スポンジ)のフィルムをはがし、シートがはみ出さないように手すり・ベースプレートを設置場所に立てる。

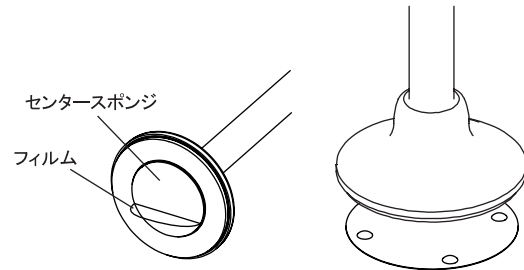


- ・センタースポンジのフィルムは必ずはがす。
- ・設置時にセンタースポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。
- ・シートがはみ出さないように設置する。
- ・シートが著しく変色・変形した場合は交換する。
- ・押しピンに曲り・サビがある場合は交換する。
- ・設置後手すりをゆらしベースプレートに滑りが発生した場合は、ベーススポンジ・センタースポンジまたはシートを交換する。

BZHO-06 タイル・Pタイルへの設置

1. 設置場所の天井や床の障害物にベースプレート、天井用ベースプレートが干渉していないことを確認する。


2. 付属の設置用テープをシートの両端(2箇所)に貼付けた後に設置用テープの剥離紙をはがしテープ面を下にしてシートを設置場所へ固定する。

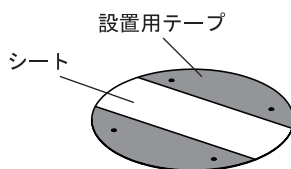

- ・タイル、Pタイルが劣化(割れ・はがれ等)している場合は設置しない。
- ・タイル、Pタイル以外への設置はしない。
- ・トイレのタイルなど水に濡れる場所には設置しない。(吸着スポンジの性能が発揮できない。)
- ・設置用テープは繰り返し使用しない。

❗ 設置用テープは必ず2枚使用する。
・床が汚れている場合はよく汚れを拭き取ってから設置する。
・床が濡れている場合はしっかりと乾かしてから設置する。

3. センタースポンジ(吸着スポンジ)のフィルムをはがし、シートがはみ出さないように手すり・ベースプレートを設置場所に立てる。

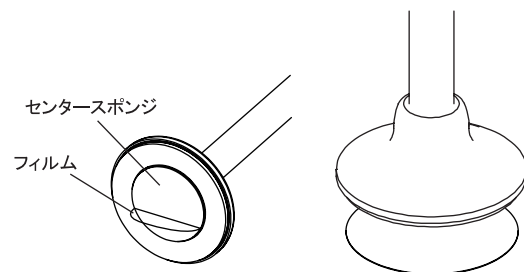

- ・センタースポンジのフィルムは必ずはがす。
- ・設置時にセンタースポンジが汚れた場合は柔らかい布で水拭きをしてしっかりと乾かしてから使用する。
- ・シートがはみ出さないように設置する。
- ・シートが著しく変色・変形した場合は交換する。
- ・設置後手すりをゆらしベースプレートに滑りが発生した場合は、ベーススポンジ・センタースポンジまたはシート・設置用テープを交換する。

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
http://www.mazroc.co.jp/

2015年10月1日改定