

取扱説明書

- この度は「たよレールhigh I型ハンド」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールhigh I型ハンド BZHO-13 / BZHO-14

納入業者様へ

設置は納入業者様が行ってください。
P.7『保証規定』に納入業者様名、ご購入日を記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。
設置後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

お客様へ

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

マークの種類について


- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

もくじ

部品明細	1
安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
取付方法	
・取付前の確認事項	4
・取付位置の目安	4
取付方法	5
お手入れ方法	6
点検	6
保管方法	6
廃棄方法	6
保証規定(保証書)	7
基本仕様	8

部品明細

- 取付け・設置前に部品の不足がないかを確認する。

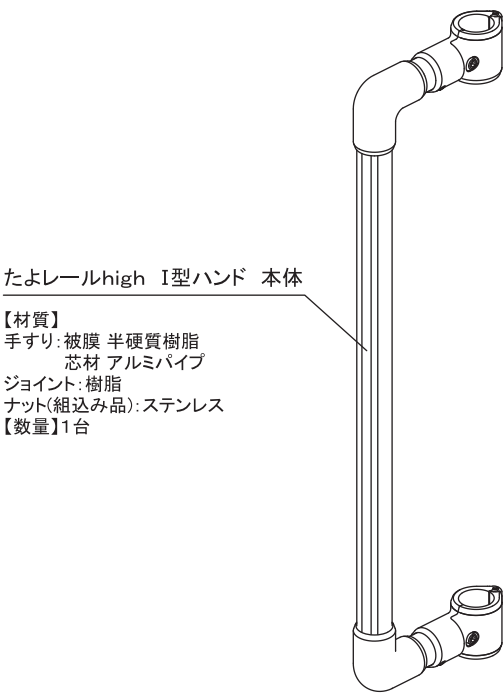

たよレールhigh I型ハンド 本体
【材質】
手すり: 被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
ジョイント: 樹脂
ナット(組込み品): ステンレス
【数量】1台

BZHO-13(蓄光タイプ)



BZHO-14

- 六角穴付きボルト
【材質】ステンレス
【数量】2本
(M6×30mm)
- 平座金
【材質】ステンレス
【数量】2枚
(呼び径6mm)

安全上のご注意

- 取付け前にこの「安全上のご注意」をよく読み、正しく取付けをする。




警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容


- 絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しない。(破損や変形、死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。また、他社製品との組合せは安全が保証できない。)
- 絶対に電動ベッドで使用しない。(死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
- 浴室・脱衣所・洗面所などで水に濡れる場所には設置しない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- ねじ等必要な部品を省かない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- 分解、改造、加工は絶対にしない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)

- 取付け、設置、取りはずしは必ず納入業者様で行う。(事故の原因となる。)
- 設置後、ガタツキ、ねじの緩みがないことを確認する。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- たよレールhighにI型ハンドとわたレールシリーズ・たよレールアップを併用して取付ける際は、両者間の角度が90°以上になるように取付ける。(頭や手足が挟まれる恐れがある。)
- たよレールhighに本製品とわたレールシリーズ・たよレールアップを複数台取付ける場合は、それぞれの間の角度が90°以上になるように取付ける。(頭や手足が挟まれる恐れがある。)


90°以上

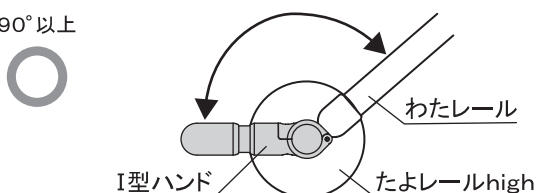


90°以上

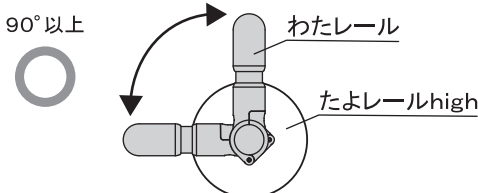

90°未満

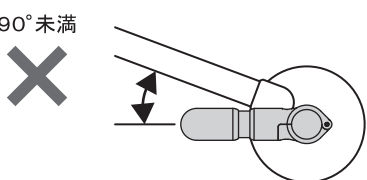

90°未満

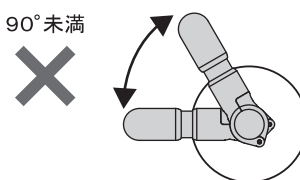


- わたレールシリーズと併用する場合やI型ハンドを2台使いする場合は、ジョイント同士のすき間は8mm未満、もしくは25mm以上とする。また、わたレールのジョイントは反対向きに取付けない。(指がすき間に入り込んで抜けなくなる恐れがある。)

a寸法が8mm未満
もしくは25mm以上



a寸法が8~24mm

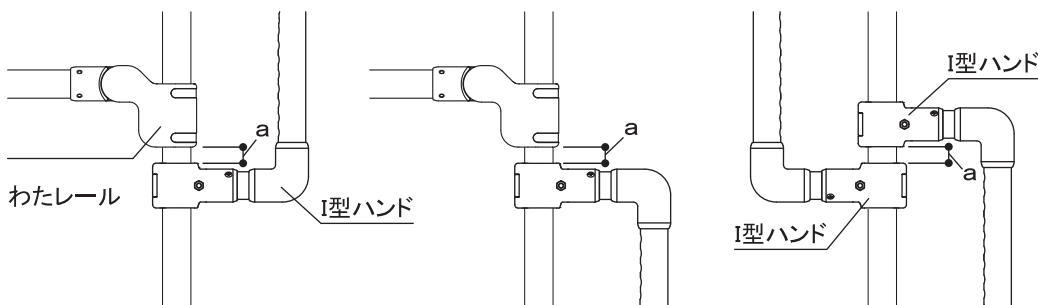

注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- 屋外や直射日光の当たる場所には設置しない。
- ヒーター(暖房機)等の前には設置しない。(破損や変形、ヤケドの原因となる。)
- 海外で使用しない。※本製品は日本国内専用
- 使用される方の動線を十分に検討して設置する。(転倒やケガの原因となる。)
- 手すり高さや位置を使用される方の身体状態に合わせて設置する。

使用上のご注意

- 使用前にこの「使用上のご注意」をよく読み、正しく使用する。



警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- ●予測できない行動をする可能性がある方や自力で危険な状態から回避できない方には使用しない。
(死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
- キャスター付のベッドで使用する際は、ベッドが動かないようにキャスターホルダー等で固定する。
- 折りたたみベッドで使用する場合は、必ず折りたたみ機構をロックする。
- 手すりの間に頭や手足を入れない。(窒息や骨折など、死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
- 動作補助具以外の用途で使用しない。(死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
- 子どもの遊具として使用しない。(破損、変形やケガの原因となる。)
- 車椅子からの立ち上がりには使用しない。(転倒やケガの原因となる。)
- 手すりを垂直方向に(上に)引っ張らない。(ベースプレートが動き、転倒やケガの原因となる。)
- 使用に際しては、使用される方の身体の状態により介助者が付き添うなど、安全には十分に配慮をする。
- 介助者が必要な場合は必ず付き添う。(転倒やケガの原因となる。)
- 介助者が使用される方の状態(安全に使用できる状態にあるか)を確認する。
※使用される方の健康状態や体調が変化した場合は、医師や介護福祉士などの専門員に相談してください。
※ご使用の際は、介助者が付き添って使用されることをお勧めします。



注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- ●手や足または製品が濡れている状態で使用しない。
- 2人以上で同時に使用しない。
- 火気を近づけない。


設置方法

取付前の確認事項

- 組立に必要な工具を確認する。
- 対応たよレールを確認する。



⊘ 絶対に指定製品以外と組合せて使用しない。

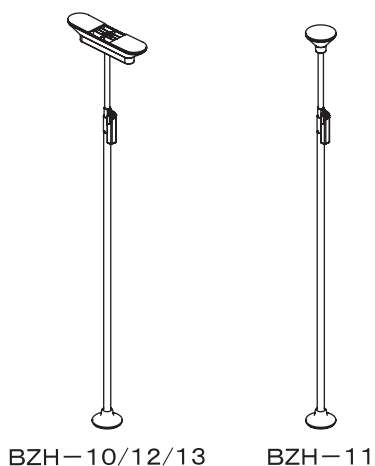


その他、取付可以外のたよレール

取付位置の目安


- 手すりは、使用される方の身体状況に合わせて設置する。
- 手すりを握る高さは、肘を90度に曲げた姿勢での手の高さから肩の位置ぐらいまでを目安としてアセスメントする。

⚠ 必ず使用される方の最適な位置を確認して設置する。手すり高さ・位置に関しては、あくまでも目安とする。

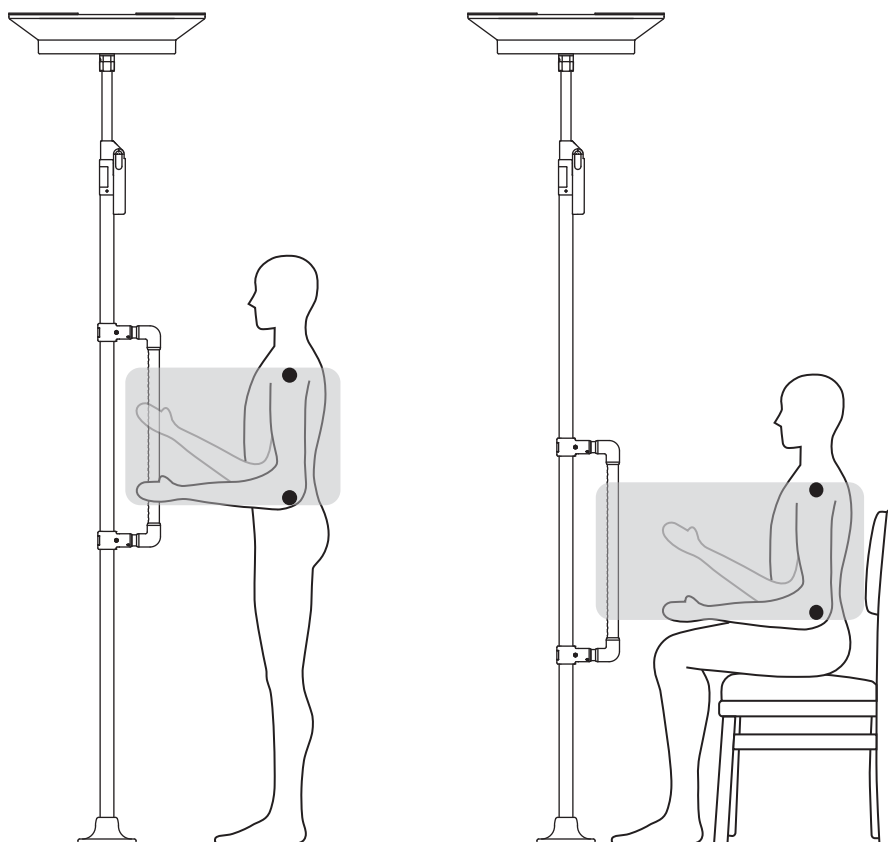

取付方法

- 取付け位置を決めて六角穴付きボルト(M6×30mm)と平座金(呼び径6mm)でジョイントを固定する。

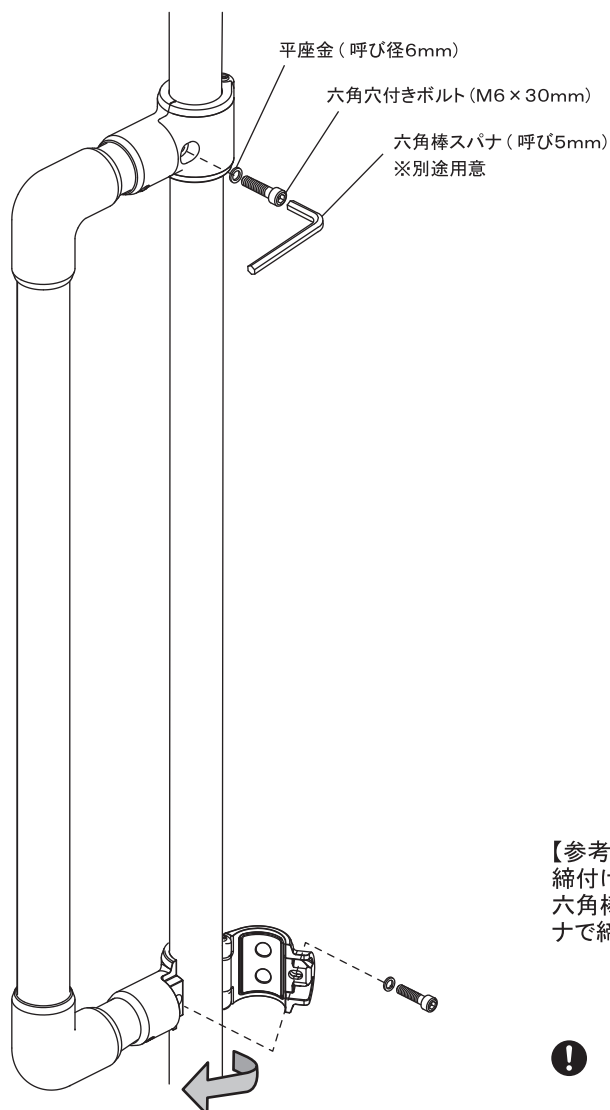

【参考】

締付け強度 (トルク) :

六角棒スパナ7.8 N・m～9.8 N・m (六角穴付きボルトを六角棒スパナで締付け、ボルトのねじ部がナットに掛かってから8～8回転半程度)



- ・2本ある六角穴付きボルトは交互に少しずつ締めていく。
1本を一気に締込むとボルトとナットが噛みこむ原因となる。
また、取りはずす際も交互に少しずつ緩めて取りはずす。

お手入れ方法

から拭きでのお手入れ

1. やわらかい布でから拭きする。

中性洗剤でのお手入れ

1. 中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとる。
2. 洗剤が残らないように水拭きする。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

塩素系洗剤でのお手入れ

※市販の漂白剤(塩素濃度約5%)の場合

1. 塩素系洗剤を濃度0.02%^{注1)}(500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルのキャップ半杯)以下で希釈する。

注1)厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じる

2. 柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭く。



- ・酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ・クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。(傷の原因となる。)
- ・浸け置き洗いはしない。(変形変色の原因となる。)

点検

- 定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじの緩み、破損、その他異常がないかを確認する。



- ・異常があった場合は直ちに使用を中止し、納入業者へ相談する。

保管方法

- 直射日光が当たらない、乾燥した常温の室内で保管する。変質・変色の原因となる。
- 高温多湿の場所で保管しない。カビの発生および変形の原因となる。

廃棄方法

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。

保証規定(保証書)

●保証期間:お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)組立不備による損傷および不具合。
- (10)納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名：

ご購入日： 年 月 日

基本仕様

品名: たよレール high I型ハンド(BZHO-13/14)

材質: 手すり (被膜)半硬質樹脂
ジョイント (芯材)アルミパイプ
樹脂

性能: 抗菌仕様(手すり部)

原産国: 日本

寸法: 図参照

※商品改良の為、仕様・デザインなど
断りなく変更することがありますのでご了承ください。

