

# 取扱説明書

- この度は「たよレールウエイトU」をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールウエイトU 標準型 BZUO-02  
たよレールウエイトU マルチ型 BZUO-03

## 納入業者様へ

取付けは納入業者様が行ってください。  
P.4『保証規定(保証書)』に納入業者様名、ご購入日を  
記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。  
設置後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

## お客様へ

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守って  
ください。不適切な使用により事故が発生した場合、  
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承  
ください。

## マークの種類について


- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

## もくじ


|             |     |
|-------------|-----|
| 部品明細        | 1   |
| お手入れ方法      | 1   |
| 安全上・使用上のご注意 | 2   |
| 取付方法        | 2-3 |
| 点検          | 3   |
| 保管方法        | 3   |
| 廃棄方法        | 3   |
| 保証規定(保証書)   | 4   |
| 基本仕様        | 4   |

## 部品明細

- 取付け・設置前に部品の不足がないかを確認する。

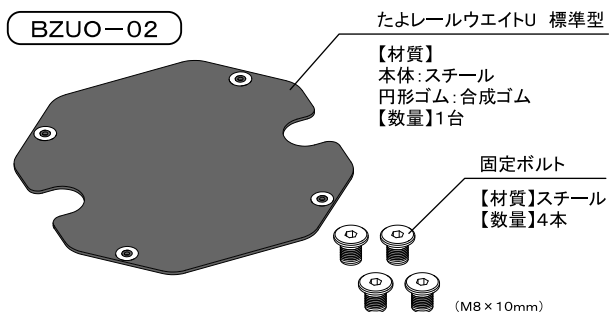

※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

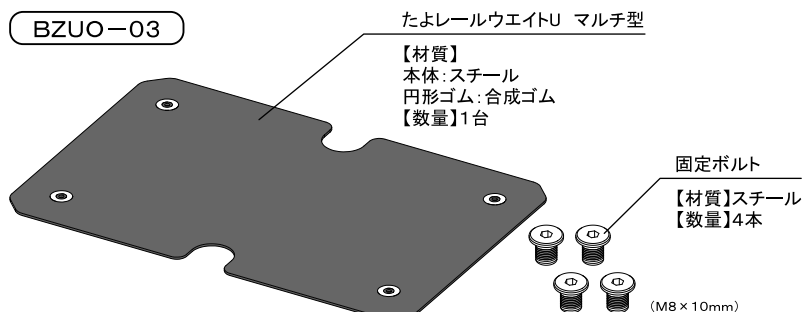

※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

## お手入れ方法

### から拭きでのお手入れ

1. やわらかい布でから拭きする。

### 塩素系洗剤でのお手入れ

※市販の漂白剤(塩素濃度約5%)の場合

1. 塩素系洗剤を濃度0.02%<sup>注1)</sup>(500mlのペットボトル1本の  
水に2ml、ペットボトルのキャップ半杯)以下で希釈する。

注1)厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる  
感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における  
消毒液の基準に準じる

2. 柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に  
溜まらないように注意しながら手早く拭く。

### 中性洗剤でのお手入れ

1. 中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとる。
2. 洗剤が残らないように水拭きする。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

- ⊘ 酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の  
有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ⊘ クレンザー、磨き粉、たわし等は使用しない。  
(傷の原因となる。)
- ⊘ 浸け置き洗いはしない。(変形変色の原因となる。)

## 安全上・使用上のご注意

- 取付け前にこの「安全上のご注意」をよく読み、正しく取付けをする。



### 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- 絶対に指定製品以外や他社製品と組合せて使用しない。  
(破損や変形、死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。また、他社製品との組合せは安全が保証できない。)
- おもしろ以外の用途で使用しない。
- 取付け後、移動させる場合は、たよレールのベースプレート部を持って移動させる。  
(大変重たい商品の為、移動させる場合は注意する。手すり部を持った場合、ベースプレートが落下する恐れがある。)




### 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- 屋外・浴室には設置しない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- ヒーター(暖房機)等の前、火気の近くには設置しない。(破損や変形、ヤケドの原因となる。)
- ねじ等必要な部品を省かない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- 分解、改造、加工は絶対にしない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- 日本国外で使用しない。
- 設置後、ガタツキ、ねじの緩みがないことを確認する。
- 結露した場合は、乾いた布などで拭きとる。(転倒やサビの発生原因となる。)


## 取付方法

1. 手すりを支柱に差込み、組立てる。  
(たよレールUPDATEの取扱説明書参照)

BZU-01

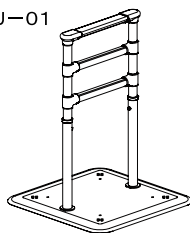


BZU-04

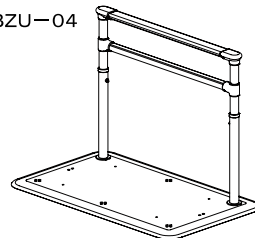

2. ウェイト取付け位置を確認し、ウェイトの上にベースプレートを乗せる。

ベースプレートのウェイト固定ボルト穴から見える白目印シールを確認し、4か所の穴位置をウェイトに揃える。

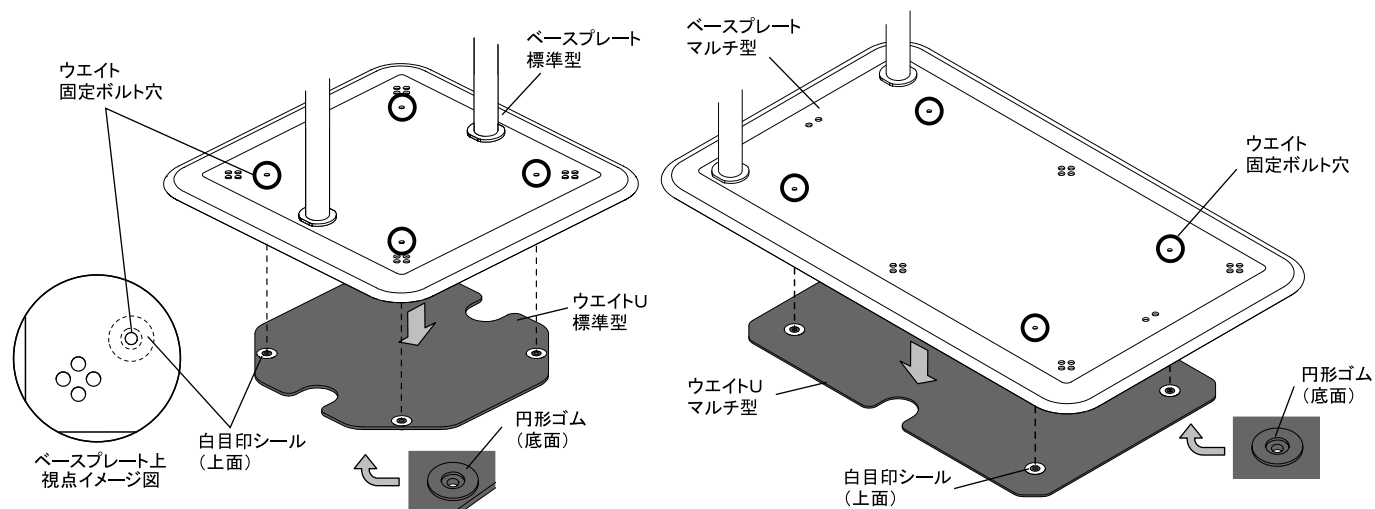


- ウェイトを地面に置く際は白目印シールを上面に、円形ゴムを底面に置くこと。
- 穴位置を揃える際は、ベースプレートを持って微調整すること。

## 取付方法


### 3. ベースプレートの表側より固定ボルトを 少しづつ締付け、仮固定する。

六角棒スパナ(呼び4mm)を用意し、下図の順番で対角線上の  
固定ボルトを数周に分けて少しづつ締付ける。  
取りはずす際も、同様の順番で少しづつ緩めて取りはずす。

BZUO-02の場合

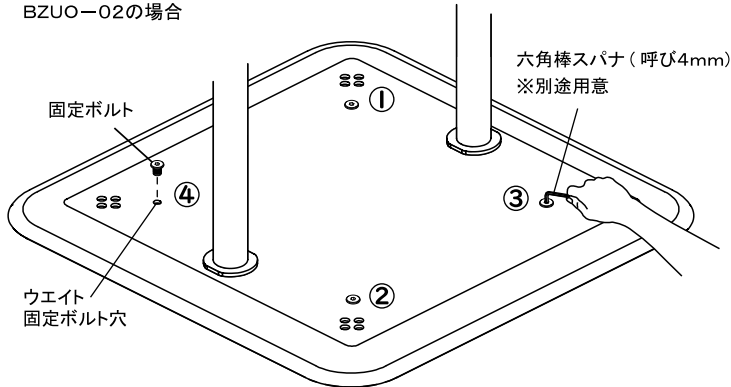


❗ ウェイト固定ボルト穴に対して、まっすぐボルトを締付ける。  
斜めに締付けるとねじ山がつぶれてボルトをはずせなくなる  
恐れがある。

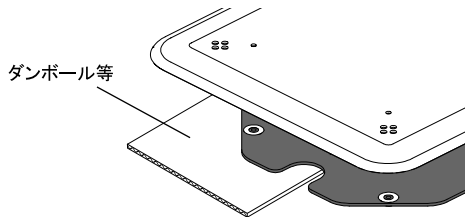

❗ 毛足の長いカーペットなど材質が柔らかい床の上で固定作業を  
行う際は、ウエイトの下にダンボール等の板を敷いて作業する。  
ウエイトが床に沈み、固定ボルトがねじ山に届かない場合がある。


### 4. 仮固定していたウエイトと固定ボルトを 六角棒スパナ(呼び4mm)で確実に締付ける。

(固定ボルトが止まるまで締付ける。)

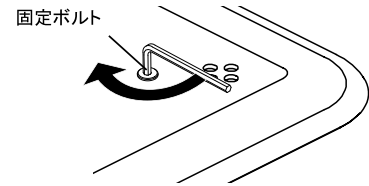


### 5. ベースマットU標準型/マルチ型をベースプレート に貼付ける。(ベースマットUの取扱説明書参照)

BZU-01

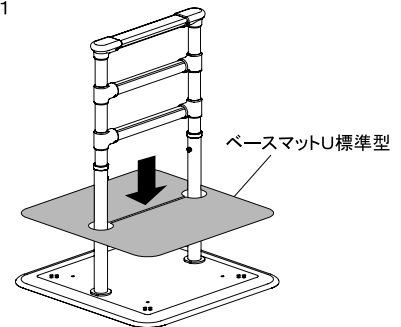

BZU-04

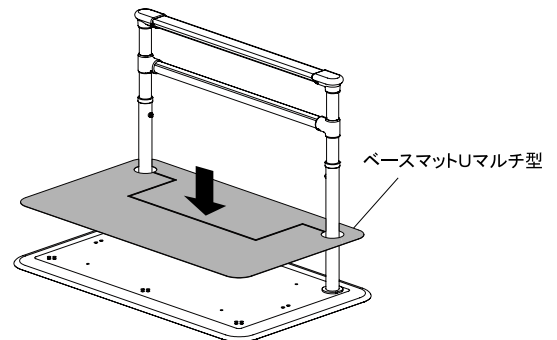

## 点検

●定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじの緩み、破損、その他異常がないかを確認する。

❗ 異常があった場合は直ちに使用を中止し、納入業者へ相談する。

## 保管方法

●直射日光が当たらない、乾燥した常温の室内で保管する。変質・変色の原因となる。

●高温多湿の場所で保管しない。サビやカビの発生の原因となる。

## 廃棄方法

●廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。

## 保証規定(保証書)

### ●保証期間:お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)組立不備による損傷および不具合。
- (10)納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名：

ご購入日：                      年                      月                      日

## 基本仕様

品名:たよレールウエイトU (BZUO-02、03)



|          |           |
|----------|-----------|
| 材質: ウェイト | 本体/スチール   |
|          | 円形ゴム/合成ゴム |
| 固定ボルト    | スチール      |

原産国: 日本

重量: BZUO-02/4.9kg  
BZUO-03/6.6kg

寸法: 図参照

※商品改良の為、仕様・デザインなど  
断りなく変更することがありますのでご了承ください。

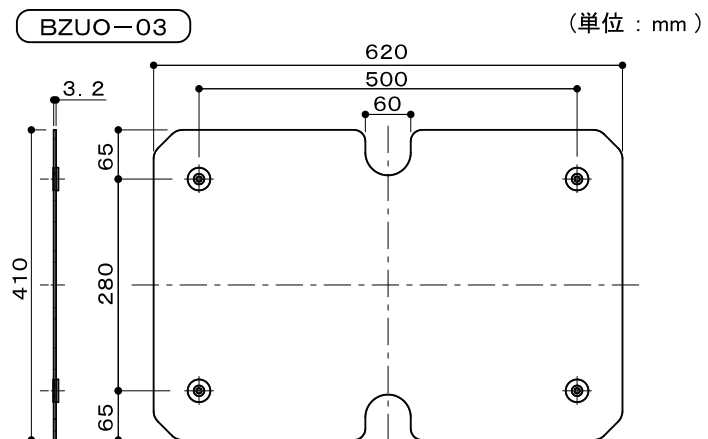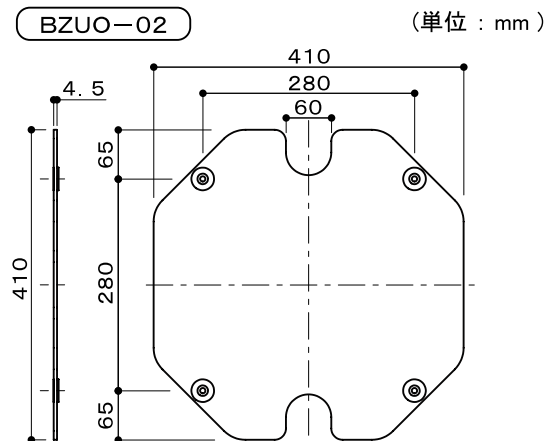

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号  
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248  
<https://www.mazroc.co.jp/>