


2. 取付け位置の強度を確認してください

壁材が石こうボードの場合、強度がなく大変危険です。必ず壁の内側の柱や間柱に取付けてください。

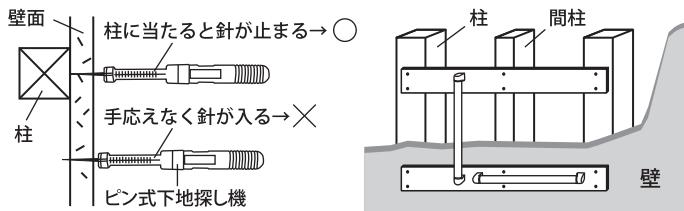


上図のように、市販の「ピン式下地探し機」を使えば簡単に探すことができます。

市販の「補強板」「ベースプレート」を柱や間柱に取付け、手すりを上図のように取付けてください。


3. ねじ止め位置に下穴をあけてください

ねじ位置(×)に印をつけ、取付け用の下穴($\phi 2.8\text{ mm}$)をあけてください。

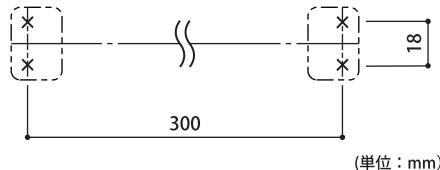

4. プラケットを固定してください

プラケットを下穴位置に合わせ、付属の \oplus 皿タッピンねじ($3.5 \times 40\text{ mm}$)を使用し壁に固定します。施工後は、ガタツキが無い事を必ず確認してください。

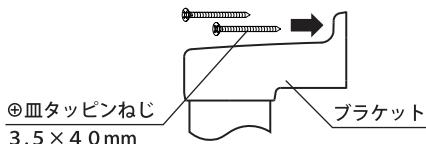

お手入れ方法

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、水拭きをしてください。仕上げにから拭きをして、水分を完全に取り除きます。汚れが目立たないうちから、こまめなお手入れを行ってください。

保証規定（保証書）

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに
事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、
当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)施工不備による損傷および不具合。
- (10)レシートがない場合。

又はご購入先名、ご購入日を明記されていない場合。

ご購入先名：

ご購入日： 年 月 日

発売元
マツ六株式会社
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
<https://www.oekakitesuri.jp/>

2023年3月1日制定【01】

お絵かき手すりDIYキット

取扱説明書

このたびは【お絵かき手すり DIYキット】をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、商品の仕様は予告なく変更することがございます。

※本製品に使用するお客様側がお書きになった「お絵かき」について、当該図柄が、第三者が保有する著作権、意匠権、商標権等の知的財産権にかかるものと同一あるいは類似である場合は、本製品を譲渡したリインターネットで発信するなどその行為態様により法律違反になる可能性がありますので十分ご注意くださいようお願いいいたします。

使用上のご注意

⚠️ 警告 死亡または重傷を負う可能性があります

- 下地のないところには取付けないでください。


強度の弱い壁や石こうボードで下地の無い壁などに手すりを施工すると、使用中に壁が壊れたり、手すりがはずれ重大な事故の原因になります。
下地がない場合は、下地補強を行った上で、手すりを施工してください。

- 一般住宅専用です。それ以外の場所では使用しないでください。
- 浴室や屋外には使用しないでください。
- 乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 物をぶつけたり、強い力で押したり引いたりしないでください。
- 形状を変えたり切断したりして使用しないでください。

⚠️ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性があります

- 一度ねじを打ち込んでしまうと修復が困難になるので、取付け位置を十分に確認してください。
- 必ず付属の取付けねじで固定し、必要な部品を省かないでください。
- 定期的にガタツキがないか確認してください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
- 火気を近づけないでください。

梱包内容

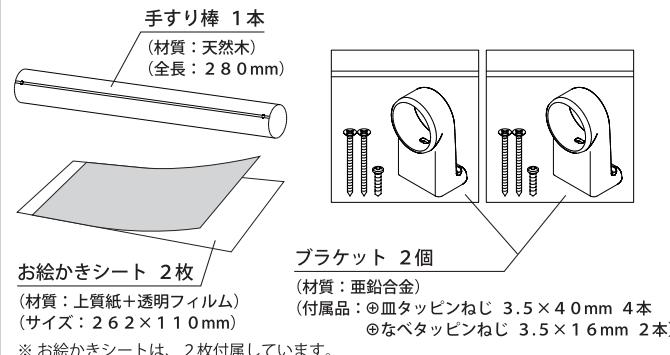

取付前の準備

必要な工具類を確認してください



※電動ドライバーをお持ちの場合は、使用をおおすすめします。その際、必ず木工用ドリル($\phi 2.8\text{ mm}$)で下穴をあけてください。

つくり方


お絵かき手すりの詳しいつくり方はWebサイト内で動画を公開しております。
ご覧になりたい方は、パッケージのQRコードからアクセスしてください。
お子さまが作業される場合は、大人の方が付き添いの上、一緒につくってください。

・マークの種類について


! 注意すべきポイント

▶ 動画でチェック

1 お絵かきシートのお絵かき面(白色)に絵を描きます。

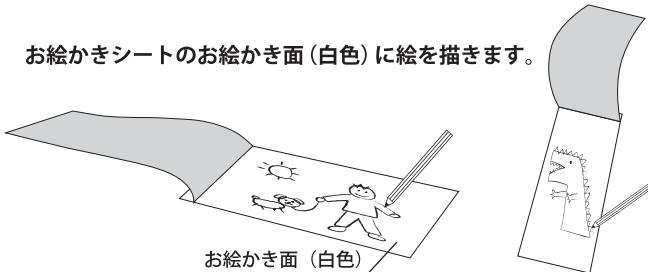


※色えんぴつ、カラーペン、マジックペン等をご使用ください。クレヨンや
絵の具、その他、押し花や厚みのある画材はご使用いただけません。

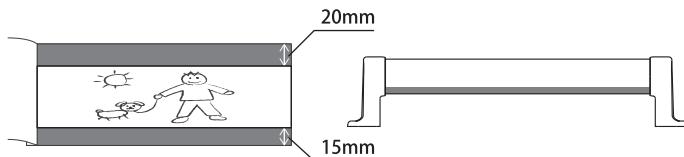

! 上図のグレーの部分は、手すり棒が完成したときに絵が見えない位置
にくるので、白いスペースに絵を描いてください。


2 お絵かきシートの青色の紙を少しずつはがし、保護フィルムを絵 にゆっくりと貼付けます。

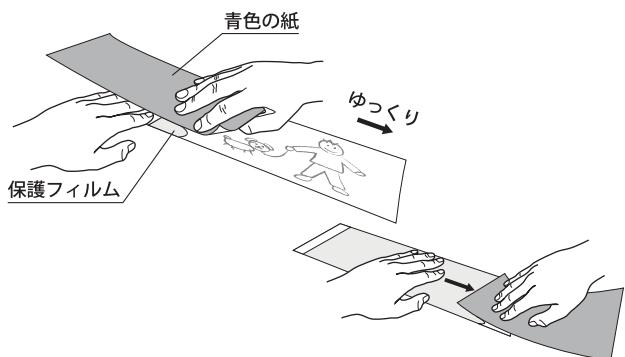

▶ 片方の手で青色の紙の上から保護フィルムを軽くおさえながら
貼ってください。


! シワが寄ったり、気泡が入ったりしないよう気を付けながらゆっくりと
貼付けてください。

3 お絵かきシートを手すり棒に貼付けます。

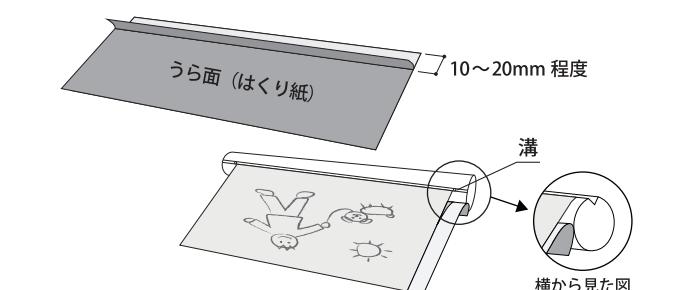

▶ お絵かきシートをうら面に向け、はくり紙を10~20mm程度はがし
折り目をつけたら、お絵かきシートをおもて面に向け、手すり棒の溝
のふちとお絵かきシートの端を貼付けます。


! お絵かきシートが手すり棒下穴をふさがないよう、
穴の内側に合わせて貼付けてください。

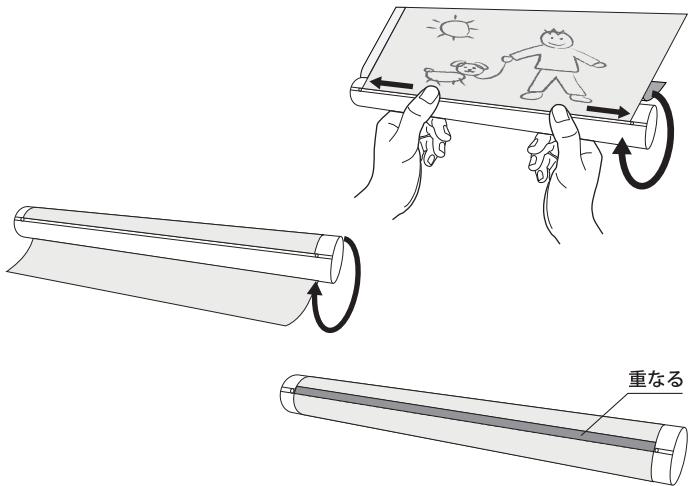

▶ お絵かきシートを手すり棒の中心から外に押すようにゆっくりと貼付けます。最後はシート同士が10mm程度重なります。

! シワが寄ったり、気泡が入ったりしないよう気を付けながら
ゆっくりと貼付けてください。

4 手すり棒両端にブラケットを差込み、 \oplus なベタッピンねじ (3.5×16mm)で固定します。

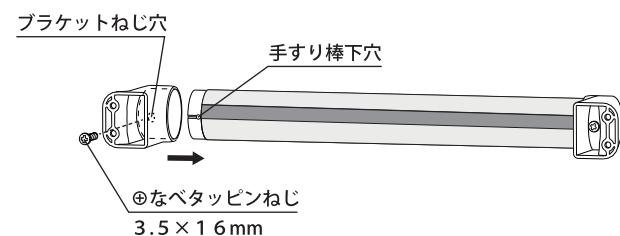

▶ ブラケットねじ穴と手すり棒下穴位置を合わせて、プラスドライバーで
ねじを取り付けてください。

5 手すりを平らなところに置き、ガタつきがなければ完成です。




! ガタつきがある場合は、どちらかのブラケットのねじを
少しうるめて水平になるよう向きを調整してください。

取付手順

1. 取付け位置を決めてください

手すりを取付ける場合に目安となる標準寸法を記載しています。取付ける高さは
使用される方の身長や使用場所に応じて調整してください。
タテ・ヨコの両方に使用できます。

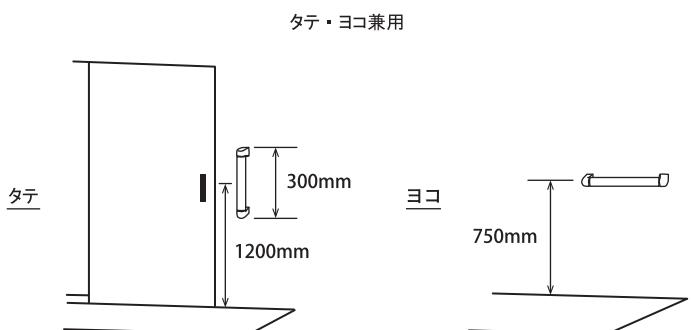

裏面につづく